

美肌フォトフェイシャル

全10step

毛穴・シミ・しわ・赤み・ニキビ跡などさまざまな効果が期待できます！

①まずはご希望の効果ごとにフィルターを変える

フィルター種類

530nm 美肌フォトフェイシャル

640nm 脱毛

ハンドピースは重いので落とさないよう注意



②電源1と電源2をつける



③画面上をタッチ

④右下のボタンをタッチ


⑤肌の若返りを選択



右下のGOボタンをタッチ

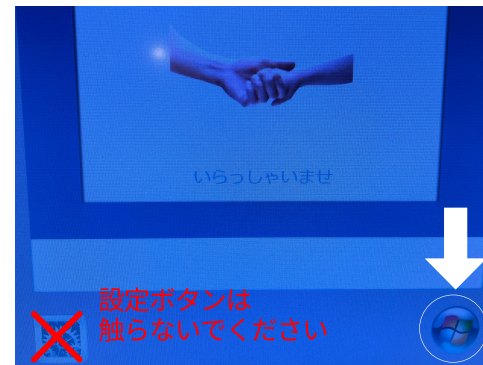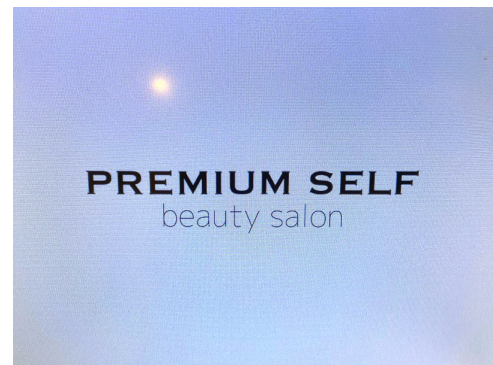

⑥出力を設定してスタート準備

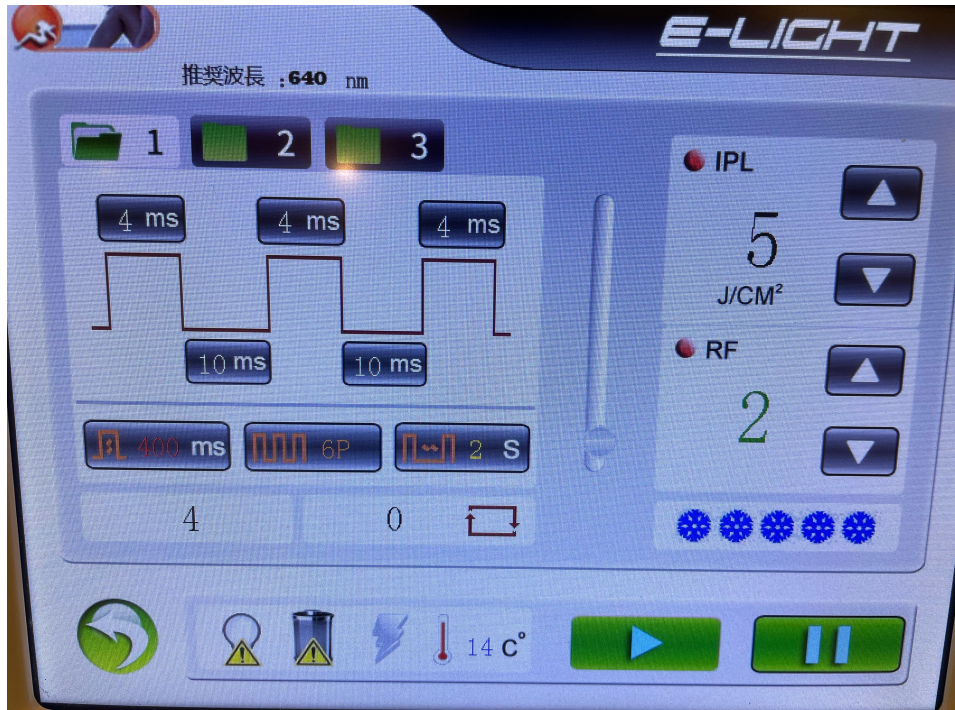

● IPL 5からスタート おすすめ10 MAX30まで

● RF 2からスタート おすすめ5 MAX15まで

👉 お肌の状態を見ながら慣れるまでは低い出力で、慣れてきたら徐々に出力を1ずつ上げてください！

▲ ▼ 調整ボタン ❄️ 冷却マーク【5つ点灯】

▶ スタート ■ ストップ（一時停止）

⑦肌にジェルを伸ばし専用ゴーグルをつけ ハンドピースを肌に密着させたら準備完了



こちらのボタンで打ち始めます
長押しで連射モード可能

👉 一発で十分な効果があります。
必ずヘッドの光っている個所の回りが冷たくなっていることを確認出来てから照射を始めてください。



ハンドピースに640nmのフィルターが入っていることを改めて確認！（違っていたら交換してください）

▶ スタートボタンで照射開始！
スタートボタンを押すとハンドピースが点灯します。

施術後


⑧ 施術が終わったら
ストップボタンで終了



⑨ 終わったらハンドピースの
ジェルをしっかりと拭いて
フィルターを外す



⑩ マシンの電源2と電源1を
切って終了

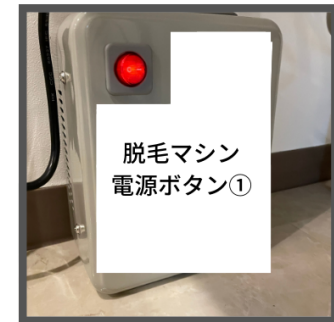

お帰りの際出たゴミは全て専用ビニール袋に入れてからゴミ箱へ捨ててください

FINISH

注意事項

ハンドピースを落とさないよう注意してください。

保護ゴーグルをつけていても光を直視しないようにお願いします。無理に出力を強くしすぎると火傷する危険性もありますので、出力に関しては十分に注意し弱い出力から始めてください。(特に肌が黒い場合は光を吸収しやすくなるためパワーを低めに設定し様子を見ながら徐々に上げていくようにしてください。)

当日肌には日焼け止めなど何もつけてない状態で専用ジェルをつけて施術してください。施術後は乾燥しやすくなるため保湿と日焼け対策を行い肌に負担をかけないようにご注意ください。施術後の赤みが気になる方はご自宅の保冷剤などで20-30分程度冷やしてください。

間隔は3週間以上空けてください。

PREMIUM SELF
beauty salon